

Bruksanvisning för Badhjälpen YNGWE

Modell: 50 (max 50 kilo)

Modell:100 (max 100kilo)



Kviddas väg 11
784 55 Borlänge

Telefon: 0243-833 78
Mobil: 076-793 43 57

Hemsida: www.swehelp.nu
E-post: info@swehelp.nu



Syfte

Badhjälpen YNGWE är ett tryggt och säkert hjälpmedel för dig med rörelsehinder och som har svårt att ta dig ner i vattnet vid bad. YNGWE är en hopfällbar badstol som är tillverkad av syrafast, rostfritt stål samt ett tygnät som sittdel. Hjulen är breda samt mjuka vilket underlättar transport i sand. Produkten levereras i tillhörande väska och monteras ihop enligt medföljande Monteringsanvisning.

Begränsningar och varningar

Kontrollera alltid att märkningen på hjulbågen stämmer med vad som gäller med max brukarvikt. Mycket viktigt är det att kontrollera att ingen del är skadad innan montering sker enligt Monteringsanvisning. Observera klämriskan vid montering/demontering. Vid behov av reservdelar kontaktas Swehelp. Swehelp ansvarar inte för produkten om den ej används med endast originaldelar samt på ett korrekt sätt.

Skötsel och underhåll

Håll YNGWE ren, kontrollera med jämna mellanrum så att lufttrycket är rätt. Efter varje användning skall YNGWE sköljas av med rent vatten. Före nedpackning och förvaring är det viktigt med en grundlig rengöring med mild tvållösning samt tvätt av tyget.

Max brukarvikt på YNGWE 50 är 50kg

Max brukarvikt på YNGWE 100 är 100 kg.

Vikt på YNGWE 50 med tillhörande väska: 12 kg

Vikt på YNGWE 100 med tillhörande väska:16kg

Lufttrycket på däck ska vara 0,14 - 0,20 bar och har en bilventil.

YNGWE har följande mått:

<i>Monterad</i>	<i>Omonterad i väska</i>
Bredd: 650 mm/800mm 100kg	420mm/500mm 100kg
Höjd: 1180 mm/1250mm 100kg	300mm
Längd: 1400 mm	800 mm